

# Besondere Merkmale

## HeartSave AED-M | HeartSave 6 | HeartSave 6S

- **DISPLAY**  
Die Geräte der HeartSave Profi-Serie verfügen über ein großes beleuchtetes Display zur Anzeige von 2 EKG-Kurven (Ableitungen frei wählbar), Vitalwerten und zusätzlichen Informationen (1 Kurve beim AED-M). Für den Außeneinsatz ist die HeartSave-Profi-Serie optional mit einem transflektiven Display erhältlich, welches auch bei starker Sonneneinstrahlung eine hervorragende Ablesbarkeit gewährleistet.
- **EKG-KABEL**  
Um schnell und kostengünstig das EKG des Patienten darstellen und beurteilen zu können, bieten HeartSave 6 & 6S ein serienmäßiges 4-poliges EKG-Kabel für eine 6-Kanal-Ableitung mit Druckknopf-Elektroden. Für den AED-M ist optional ein 2-poliges EKG-Kabel für 1 EKG-Kurve erhältlich.
- **ÜBERWACHUNG**  
HeartSave 6 & 6S verfügen für alle abgeleiteten Parameter über frei einstellbare Alarmgrenzen. Somit lassen sich Ihre vital stabilen Patienten zusätzlich sicher überwachen.
- **MANUELLER DEFIB-MODUS (nur HeartSave 6/6S)**  
Zusätzlich zum AED-Betrieb ist jederzeit eine Umschaltung in den manuellen Defib-Betrieb möglich. Hier können Sie zwischen mehreren Energiestufen auswählen, die sich bei Wechsel in den Kindermodus auf angepasste niedrigere Energiestufen ändern.
- **KARDIOVERSION**  
Sobald der HeartSave 6/6S einen Herzrhythmus mit QRS-Komplexen erkennt, wechselt das Gerät automatisch vom direkten Modus in den Synchron-Betrieb, so dass Sie auch eine Kardioversion durchführen können.
- **SpO<sub>2</sub>**  
Mit dem HeartSave 6S verfügen Sie zur erweiterten Überwachung und Beurteilung Ihres Patienten zusätzlich über die Option der SpO<sub>2</sub>-Messung per Fingersensor. Auf dem Display werden Ihnen hierbei Sättigung, Puls und Plethysmographie-Kurve angezeigt und per Alarmgrenzen überwacht.
- **AKKU-BETRIEB**  
HeartSave AED-M, 6 & 6S lassen sich alternativ zur Standard-Stromversorgung per Langzeitbatterie (Lebensdauer 6 Jahre / 200 Schocks) auch kostensparend mit einem optional erhältlichen Akku betreiben.  
Für ein noch einfacheres Handling steht Ihnen als Ergänzung noch eine Wandhalterung mit aktiver Ladung zur Verfügung. Mit nur einem Handgriff lässt sich das Gerät entnehmen, und wird nach dem Einsatz in der Halterung automatisch wieder geladen.
- **KINDERMODUS**  
Für den Fall einer Kinderreanimation lassen sich der HeartSave AED-M / 6 / 6S mit einfachem Tastendruck in einen Kindermodus umschalten, so dass Sie auch mit Erwachsenenelektroden eine Defibrillation mit reduzierter Energie durchführen können.
- **MEHRSPRACHIGKEIT**  
HeartSave AED-M, HeartSave 6 und HeartSave 6S sind ab Werk mit vier Sprachen ausgerüstet. Diese lassen sich im laufenden Betrieb per Menüauswahl wechseln.
- **TÄGLICHER SELBSTTEST**  
Um Ihnen jederzeit sicher und zuverlässig zur Verfügung zu stehen, führen alle HeartSave-Geräte einen umfangreichen täglichen Selbsttest durch. Die Bereitschaft wird Ihnen permanent durch ein gut sichtbares 'OK' am Gerät angezeigt.

